



MeniLAB é a primeira solução de limpeza, desinfeção* e eliminação de príões especificamente concebida para a descontaminação de lentes de contacto RGP de teste de diagnóstico**

PARA UTILIZAÇÃO APENAS POR PROFISSIONAIS

Composição:

Solução de cloro ativo qs 0,5% ou 5 000 ppm de cloro ativo
Água purificada. qs 100%
Apresentação: 250 ml CE 0483

Para mais informações sobre a MeniLAB contacte: -

A equipa de apoio técnico

Menicon Limited

Tel. : +44 (0) 1604-646216

Fax: +44 (0) 1604-790366

E-mail: peterrolfe@davidthomas.com

** cf. testes de desinfeção:*

eficácia antiviral (Universidade de Medicina de Nancy MDT, Referência: CEN/TC 216/N 98, AFNOR NFT 72 - 180),

atividade antibacteriana e antifúngica (MENICON PHARMA, Referência: ISO/CD 14729, teste independente),

atividade antiacantamoeba (Instituto de Bacteriologia, Universidade de Medicina de Estrasburgo;

Menicon co., Ltd / Departamento de Microbiologia e Imunologia de Leicester, Reino

Unido).

*** cf. atividade antipríões (relatório n.º 277111, junho de 2002, C.E.A./SPI BIO/MENICON)*

Menicon Limited

Gatelodge Close, Round Spinney, Northampton NN3 8RJ

Tel.: +44 (0) 1604-646216 Fax: +44 (0) 1604-790366

E-mail: enquiries@davidthomas.com Web: www.davidthomas.com

5 anos de pesquisa sobre priões

Avaliação de tratamentos de inativação de agentes infecciosos não convencionais:

Após 5 anos de várias e intensas pesquisas realizadas pelo Laboratório de Neurovirologia do Comissariado para a Energia Atômica francês, liderado pelo Professor Dominique Dormont, com a parceria da SPI-BIO, Menicon Pharma e Menicon Europa, os resultados finais do estudo 277111, “Avaliação da eficácia dos protocolos para desinfecção de lentes de contacto rígidas gás-permeáveis através de inativação e/ou remoção de agentes de encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET, Priões)”, foram publicados no “J.Fr.Ophthalmol”. 2003; 26, 3,233-239. (Cópias disponíveis mediante pedido)

Na prática, o estudo demonstra, através da utilização de 7 grupos de tratamento Menicon, a eficácia da solução de hipoclorito de sódio com uma baixa concentração de cloro ativo (0,5%) na inativação em 5 minutos de priões em lentes Menicon Z moídas contaminadas com uma estirpe de EET de laboratório.

Com base nestes resultados, a utilização da agora disponível solução MeniLAB 0,5% em lentes RGP após cada teste, só por si, pode reduzir uma contaminação hipotética por priões de 7,5 log em 5 minutos tão bem como a solução de NaClO referida com 2% de cloro ativo em 1 hora.

As modalidades de utilização prática da lente de contacto estão descritas abaixo:

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Depois de remover a lente de teste, limpe utilizando a solução de limpeza MeniCare Plus, friccionando durante pelo menos 20 segundos e, em seguida, enxague bem com solução MeniCare Plus.
3. Encha um frasco ou o estojo das lentes com solução MeniLAB 0,5% e deixe a lente submersa durante 5 minutos.
4. Após 5 minutos, enxague cuidadosamente durante 15 segundos, usando uma solução multiusos MeniCare Plus.
5. Guarde a lente em solução MeniCare Plus até à próxima utilização.
6. Antes de a colocar, enxague novamente com solução MeniCare Plus (repetir a secção 4).

NB: Cada tratamento tem de ser registado (documento de rastreabilidade).

Se a lente de teste estiver intacta, livre de depósitos e dentro das tolerâncias de especificação e tiver sido limpa e mantida conforme as instruções acima, pode ser usada por tempo indeterminado.

PRECAUÇÕES

- Não utilizar para lentes gelatinosas.
- O tempo de imersão na solução MeniLAB 0,5% não pode exceder uma hora (pode causar descoloração).
- É essencial enxaguar as lentes abundantemente com solução multiusos MeniCare após a imersão em solução MeniLAB 0,5%.
- NÃO coloque a solução diretamente no olho. Evite salpicar a roupa.
- Não engolir.
- Armazenar à temperatura ambiente (< 25°).
- Utilizar no prazo de 3 meses após a abertura. Tenha em atenção a data de validade.
- Nunca use água da torneira para enxaguar lentes de contacto.

RASTREABILIDADE

Deve preencher um documento de rastreabilidade para registar a data, o nome do paciente, o número do lote, os parâmetros da lente, o conjunto de teste usado, etc. (ver exemplo).

Nota: Todas as lentes de teste DTCL estão sujeitas ao procedimento de descontaminação indicado acima.

Estão disponíveis lentes de teste para utilização num único paciente (monouso). As lentes de teste NÃO SÃO PARA REVENDA.

Nota: A folha de dados de segurança (regulamentos CE 91/155/CEE/COSHH) está disponível mediante pedido. Para obter mais informações contacte o apoio técnico através do número de telefone +44(0)1604-646216 ou do e-mail peterrolfe@davidthomas.com

FOLHA DE REGISTO DE DESINFEÇÃO DO CONJUNTO DE TESTE PARA PROFISSIONAIS

Parâmetros ro / øT / bvp	Lote n.º	Procedimento MeniLAB Data/Assinatura	Procedimento MeniLAB Data/Assinatura	Procedimento MeniLAB Data/Assinatura	Procedimento MeniLAB Data/Assinatura
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

- Cada lente de teste deve receber um número. Anote os parâmetros e o número de lote.
- Depois de usar as lentes de teste: Anote os parâmetros, o número de lote, a data do tratamento e a assinatura do operador.

Menicon Limited

Gatelodge Close, Round Spinney, Northampton NN3 8RJ
 Tel. : +44 (0) 1604-646216 Fax: +44 (0) 1604-790366
 E-mail: enquiries@davidthomas.com Web: www.davidthomas.com

